



Vad är Sarepta 2?

En allmän orientering av programmet och dess möjligheter




**Nationellt Kunskapscenter
för Dövblindfrågor**



Bakgrund och aktuellt

- Föregångaren STRUKTUR skapades på 90-talet och har utvecklats sen dess av SPRIDA kommunikationscenter i Örebro.
- Finns idag några hundra användare, och det finns översatt till danska, norska, finska, isländska, nordsamiska, tyska och engelska.
- Skådalens skola for dövblindfödde i Norge har i över 15 år använt Sarepta som ett stöd i undervisningen för de flesta av sina elever.
- 2017 avslutades utvecklingen och försäljningen av programmet, som numera istället finns **gratis** att hämta tillsammans med handledningar och manualer på Region Örebro läns hemsida: [Länk till nedladdningen](#)
- För att köra programmet på ett bra sätt krävs dock att man installerat en talsyntes med SAPI-stöd.

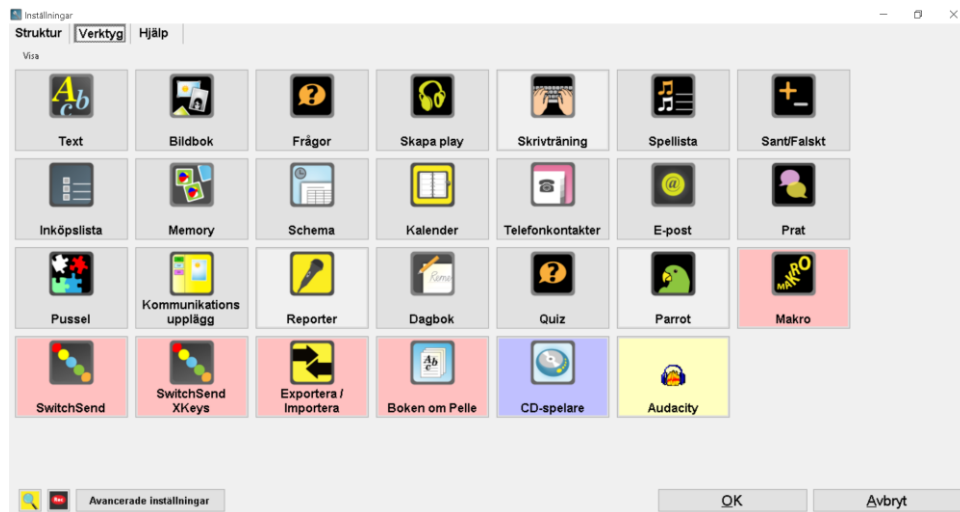

Vad är Sarepta?


- Har skapats för personer som inte har synen som sitt starkaste sinne i kombination med andra funktionsnedsättningar som t ex RH och/eller IF.
- Ett skalprogram = ett verktyg du som professionell eller anhörig kan använda för att skapa stimulerande och enkla funktioner för en person som har **unika behov och förutsättningar**.
- Fungerar med skärmläsare för punktdisplay, men saknar i övrigt taktill feedback.
- Kräver viss aktivitet och aktiva val från användaren.

Lätt att använda och omöjligt att göra fel



- För personen som är slutanvändare kan man ha en väldigt enkel och konsekvent miljö.
- Allt kan hanteras med 2 brytare – **Nästa** och **Bekräfta**. För att kunna snabba upp användandet i stora strukturer kan upp till 5 brytare användas.
- Endast det som du som skapare av strukturen lagt upp är nåbart för användaren – går att vara konsekvent eller variera utifrån personens förutsättningar.
- Användaren kan aldrig förstöra något – vare sig av misstag eller medvetet.

Strukturen - från lagret till användaren



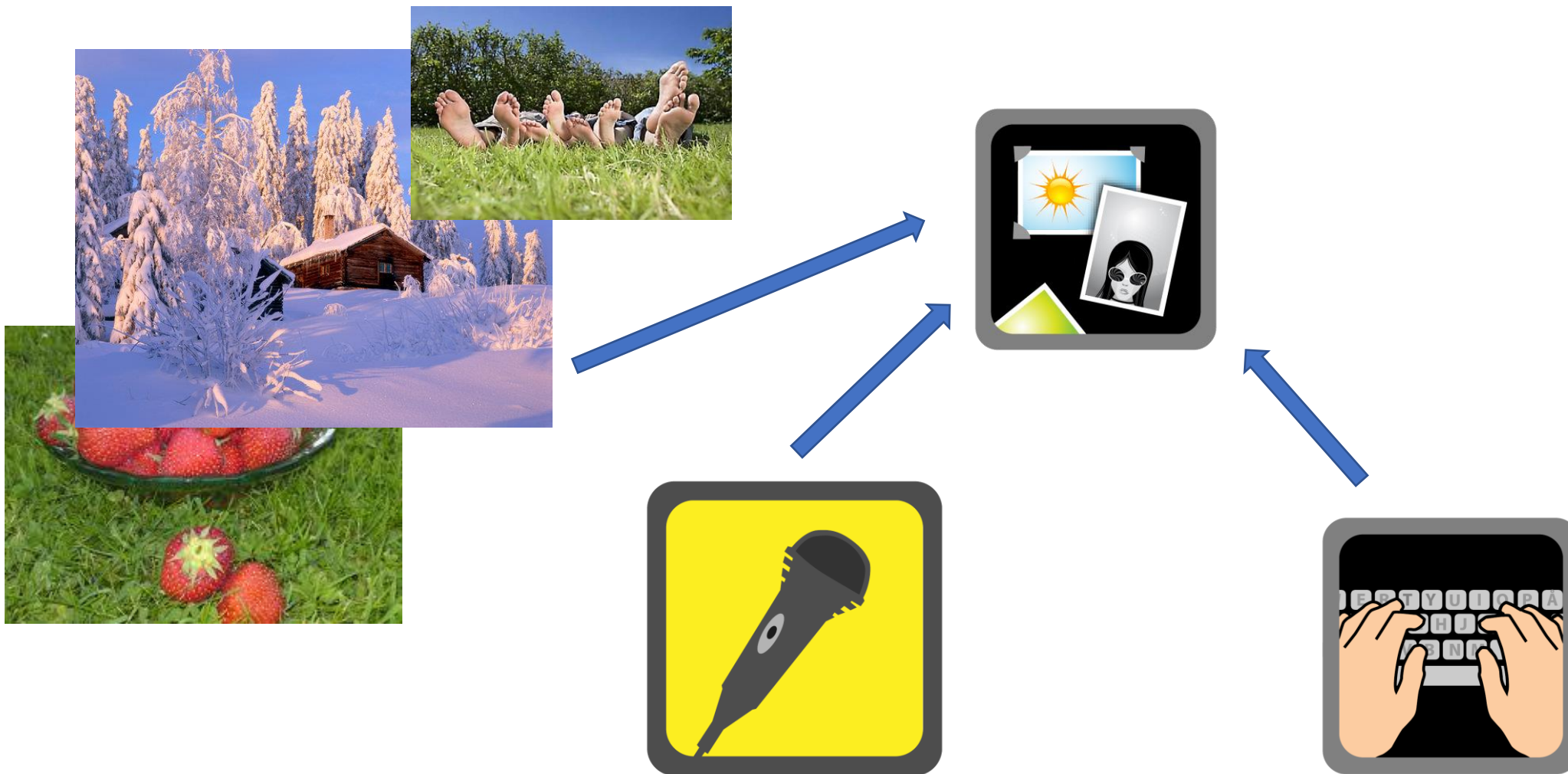


Exempel på en enkel struktur



- Välja ljud
 - Djur som låter
 - Musik
 - Klassiskt eller rock
- Sagor
 - Känner du Pippi?
 - Nya hyss av Emil i Lönneberga
 - Pippi
- Läsa
 - Om Örebro
 - Om Vasaloppet
 - Det jag skriver om nu
- Musik
 - Bo Kaspers orkester
 - Eric
- Avsluta

Brytarnas funktioner i programmet Sarepta

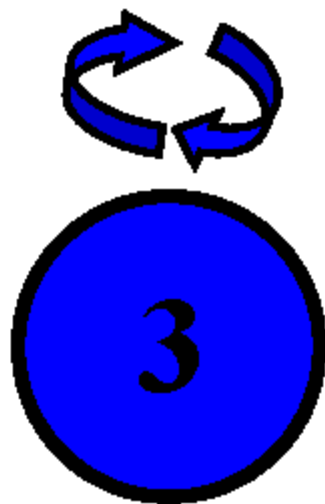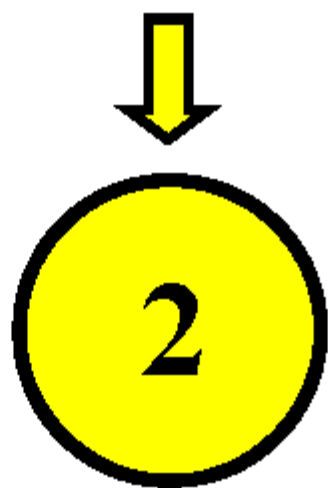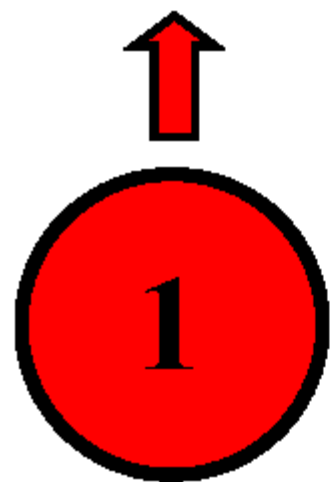

"UPP"

"NER"

"REPETERA"

"FORTSÄTT"

"BEKRÄFTA"



Nyfiken på mer?

- Titta på våra ytterligare moduler om Sarepta.
- Läs hur Skådalen använt programmet på deras hemsida [Länk till Skådalens hemsida om deras IKT-användning](#)
- Ladda ner handledningar och manual från SPRIDA på [Länk till SPRIDAs sida om Sarepta 2](#)
- Kontakta Stig-Åke Larsson på SPSM om du vill ha den senaste, delvis omarbetade versionen av handledningen. stig-ake.larsson@spsm.se
- Ladda ner programmet [Länk till SPRIDAs sida för nedladdning av program](#)
- Följ oss även om andra tips och nyheter kring teknik och hjälpmedel för personer med dövblindhet på www.nkcdb.se/expertstod/ikt/
- Maila oss gärna: ikt@nkcdb.se