

## Woojer Vest



### Beskrivning av produkten

Woojer Vest är en väst som har 6 kraftfulla bashögtalare insydda. På bilden syns den första versionen, idag finns en version 3 men med i princip samma funktion.

De har också en billigare variant som endast är ett bälte med en högtalare i, och den kallas Woojer Strap.

Man kan koppla in en ljudkälla via bluetooth eller via sladd.

Basljud som trummor känner man mycket tydligt i västen, men för att höra alla frekvenser i ljuden behöver man även koppla in ett par hörlurar eller högtalare.

Läs mer och beställ på <https://www.woojer.com/>

### Förslag på användningsområden

Lyssna/känna på musik eller andra ljud via vibrationerna för nöje och avkoppling.

Om personen gärna har på musik under andra aktiviteter, prova att använda olika musik/spellistor/ljud/takt för att förvarna/förbereda personen på ett avslut av aktiviteten. Det kan till exempel vara att ha samma spellista som är lika lång som aktiviteten varje gång, eller att byta till en viss låt några minuter innan så att samma låt alltid avslutar just den aktiviteten. På samma sätt kan en låt eller ett ljud förvarna om uppstart av en viss aktivitet.

Om man kopplar in en mikrofon med förstärkare, till exempel en Samtalsförstärkare, får man istället vibrationer av ljud i rummet. Att trumma med händerna på bordet känns i hela västen, detsamma ljuden av fotsteg. Andra ljud, som till exempel tal, känns men är svårare att definiera eftersom de mer blir ett allmänt burr.

## Komma igång

**Ladda västen** med den medföljande laddaren. Den kopplas in i kontroll-pucken på vänster axelband, i det andra uttaget från höger märkt med en blix-symbol. Skulle ni bli av med laddaren går det även att använda en laddare med USB-C-kontakt som i så fall kopplas i det tredje uttaget från höger.

När ringen runt på/av-knappen lyser rött laddas västen, när den gått över till grön är västen fulladdad.

Ladda inte samtidigt som den används.



**Slå på** västen genom att trycka på knappen i mitten några sekunder så börjar ringen runt den blinka eller lysa, motsvarande tryckning stänger av och när den är avstängd lyser inte ringen alls.

**Koppla in västen** till en ljudkälla. Om du vill koppla in med sladd (3,5mm eller USB-C) gör du det i uttagen längst till vänster som har en symbol med en fyrkant med pil in.

Vill du koppla via bluetooth behöver du para den med ljudkällan första gången. Håll knappen på på/av i mitten inne tills ringen skiftar ljus mellan rött och blått (ca 10 sekunder). Leta upp Woojer Vest Edge på ljudkällan (din mobil eller motsvarande) och anslut. Ingen kod krävs.

Vill ni höra ljudet och inte bara känna det så **koppla in hörlurar eller högtalare** i det högra uttaget som har en symbol med hörlurar.

Ställ in **volymen** på ljudet. Börja med att ställa ljudet ut från källan, till exempel mobilen. Det är normalt bäst att ha maximal volym från den.

Justera sedan ljud ut på kontrollpucken. Upp och ner med symboler pil upp och pil ner, styr vibrationerna i bashögtalarna i västen. Höger och vänster med symbolerna minus och plus styr volymen på de inkopplade högtalarna/hörlurarna.

Inställningen av volymen behöver upprepas varje gång västen startar.

## Anpassa storleken

Vibrationerna känns bäst om västen sitter rätt tätt intill kroppen. Dra gärna ut remmarna när den ska tas av och sättas på, och spänn när västen är på och båda två remmarna över bröst och mage är knäppta.

## Felsökning

När volymen är för låg och/eller ljudet inte innehåller så mycket bad känns ingenting i västen. Testa med en låt med mycket trummar och sätt upp volymen på den spelande enheten till max samt tryck 5 gånger på pil upp på kopplingspucken för att se om du får någon återkoppling.

Om västen inte får kontakt med mobilen/surfplattan, kolla så att mobilen har Bluetooth aktiverat. Prova att ta bort mobilens koppling till Woojer och gör en ny parning enligt ovan.

Lampan runt på/av-knappen kan ha olika färger. Under uppstart är den gul. När den väntar på koppling till en mobil enhet blinkar den blå och när den är kopplad till en mobil enhet lyser den med fast blått ljus.

Blinkande som skiftar mellan blått och rött betyder att den är i läge för parning till ny bluetooth-enhet.

Blinkande rött innebär att den har lågt batteri.

Fast rött betyder att den laddar och fast grön innebär att den är färdigladdad.